

IV. UWAGI EKSPLOATACYJNE

1. Do mycia i dezynfekcji stosować należy łagodne preparaty posiadające atest Państwowego Zakładu Higieny. Nie używać środków ściernych!
UWAGA: do mycia powierzchni miękkich nie wolno stosować środków na bazie benzyn, rozpuszczalników, kwasów, chloru, itp.!
2. Cechowania wyrobów dokonano w postaci etykiety identyfikacyjnej, naklejonej na każdej sztuce. Znajdują się tam następujące dane:
 - Dane producenta
 - Nazwa i model wyrobu: REF KS/MR
 - Data produkcji w formacie: LOT RRRR-MM (gdzie RRRR oznacza rok, a MM oznacza miesiąc, np. 2014-09)
 - Dopuszczalna masa użytkownika
3. **Wszystkie wyroby (poza nasadkami) posiadają 2-letnią gwarancję.**
4. **Używać wyroby zgodnie z ich przeznaczeniem!** Ewentualne zagięcia elementów metalowych z widocznymi pęknięciami powierzchni eliminują wyrób z dalszego użytkowania.
Nakazuje się sprawdzenie wyrobu przed i podczas użytkowania w celu upewnienia się, że podczas eksploatacji nie powstały zarysowania, pęknięcia itp.
5. Serwis produkcyjny w okresie gwarancji (24 miesiące) obejmuje wymianę podzespołów lub wyrobów, w których stwierdzono wady produkcyjne.
6. Serwis eksploatacyjny MIKIRAD funkcjonuje bezpośrednio w punktach sprzedaży wyrobów.
7. MIKIRAD zapewnia produkcję części zamiennych przez 10 lat od daty wykonania wyrobu.

	MODEL WYROBU
PIECZĘĆ I PODPIS SPRZEDAWCY	DATA SPRZEDAŻY

mikirad

Grzegorz Kiciór

26-600 Radom, ul. Małopolska 16

tel.: 48. 383-08-85/87

fax.: 48. 383-08-86



System zarządzania ISO 9001:2015

www.tuv.com ID 9105018396

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KRZESEŁ SEDESOWYCH

Firma MIKIRAD produkuje **krzesła sedesowe** jako wyroby medyczne przeznaczone dla osób niepełnosprawnych ruchowo, sklasyfikowane wg Normy PN-EN ISO 9999 w klasie 09 12 jako pomoce toaletowe.

PN EN ISO 9999	NAZWA WYROBU	MODEL
09 12 03	Krzesło sedesowe	KS/MR
	Krzesło sedesowe, składane	KS/MR/Sk
	Krzesło sedesowe, składane ,4 kółka	KS/MR/Sk.4k

I. UWAGI OGÓLNE

Krzesła sedesowe mają na celu ułatwienie korzystania z toalety osobom niepełnosprawnym ruchowo.

Standardowe wyroby przeznaczone są dla użytkowników o masie do 120 kg.

Konstrukcja krzesła wykonana jest z wysokiej jakości lekkich i wytrzymałych rurek aluminiowych połączonych z elementami z tworzyw sztucznych.

Krzesła wyposażone są w nakładaną i przymocowaną śrubami do tylnej rurki konstrukcji deskę sedesową oraz pojemnik ze szczelną pokrywą wykonany z łatwo zmywalnego tworzywa. Nogi krzesła zabezpieczone są nasadkami z miękkiego tworzywa, co zapobiega ślizganiu, lub czterema kółkami jezdnyymi z dwoma hamulcami, a podparcia pod dłonie użytkownika wyłożono miękką pianką poliuretanową.

Wymiary kompletnego wyrobu:

- głębokość siedziska: 43 cm,
- szerokość siedziska: 48 cm,
- waga: 3,0 kg – 3,4 kg (bez kółek lub z kółkami)

**Użytkownikom naszych wyrobów życzymy pełnej satysfakcji.
Prosimy o ewentualne uwagi w celu dalszego ich doskonalenia.**

Krzeseła mają możliwość skokowej regulacji wysokości co 20 mm (min. wys. 410 mm, max. 560 mm) poprzez wysunięcie rurek regulacyjnych z korpusu i blokowaniu ich zatrzaskiem wpasowanym w otwory znajdujące się w rurkach. Dwa zestawy otworów pod zatrzask czynią dwukrotnie większy zakres regulacji.



Fot. 1. Krzesła sedesowe nieskładane




Fot. 2. Krzesła sedesowe składane

II. UŻYTKOWANIE

1. Podnieść deskę sedesową i wsunąć pojemnik od przodu zaczepiając go na wieszakach umiejscowionych na wspornikach pod deską.
Dla celów higienicznych zaleca się przed korzystaniem z krzesła sedesowego uzupełnić pojemnik niewielką ilością wody, tak aby pokryła jego dno – ułatwi to późniejsze czyszczenie.
2. Po umocowaniu pojemnika zdjęć pokrywę i opuścić deskę sedesową.
3. W celu wyjęcia pojemnika deskę należy podnieść, zakryć szczelnie pojemnik pokrywą i ostrożnie pociągając do przodu wysunąć go z wieszaków.
4. Wyczyścić pojemnik przed kolejnym użyciem

III. KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI PRZY SKOKOWEJ REGULACJI WYSOKOŚCI KRZESŁA SEDESOWEGO (Rys. 1)

1. Wypchnąć z otworów zatrzask podwójny w ten sposób, że dwoma kciukami naciskamy na obydwie czoła skrzydełek zatrzasku w kierunku grzbietu, co spowoduje ugięcie skrzydełek i wysunięcie stalowych kołków z otworów rurek.
Zabrania się odginania skrzydełek zatrzasku, gdyż mogą ulec złamaniu lub utracą sprężystość.
2. Przesunąć rurkę regulacyjną wzdłuż osi na odpowiadającą użytkownikowi odległość pamiętając, że otwory rurki regulacyjnej muszą idealnie pokrywać się z otworami korpusu.
3. Włożyć stalowe kołki zatrzasku w ustawione otwory i dłoń wcisnąć zatrzask do pełnego przylgnięcia wewnętrznej powierzchni zatrzasku do korpusu rurki.

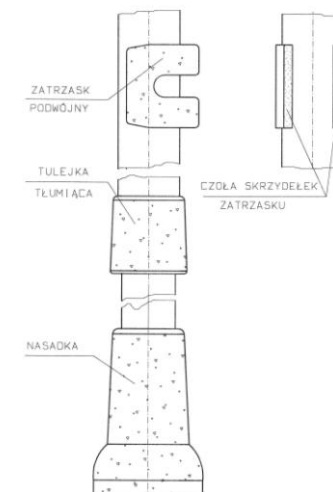

Rys.1 Regulacja skokowa

IV. POSTĘPOWANIE PRZY ROZKŁADANIU I SKŁADANIU KRZESŁ SEDESOWYCH

Przy rozkładaniu krzesła sedesowych należy ustawić wyrób tak, aby identyfikator producenta naklejony na wygiętej rurce skrzydła środkowego znajdował się z przodu krzesła. Rozstawić obydwie boczne skrzydła i połączyć zamocowane w nich przegubowo rurki tak, aby wsuwając rurkę cieńszą w grubszą, po ugięciu kołka zatrzasku nastąpiło zablokowanie obydwu rurek. Następnie zamocować stelaż podtrzymujący pojemnik z deską sedesową poprzez wciśnięcie go w równoległe, poprzeczne rurki bocznych skrzydeł krzesła. Wsunąć pojemnik w druciane wieszaki zamocowane przy stelażu. Składanie przebiega odwrotnie. Po odblokowaniu zatrzasku należy rozewrzeć skrzydła krzesła celem rozłączenia rurek. Jedno ze skrzydeł odchylamy w przód, a drugie w przeciwnym kierunku, tak by tworzyły możliwie płaską figurę.