

NSTRUKCJA MONTAŻU STOJAKÓW DO KROPLÓWEK

MONTAŻ PODSTAWY

- 1) wcisnąć przycisk w rurce dolnej
- 2) nasunąć rurkę górną
- 3) nakierować otwór w przycisk/zatrzasnąć

REGULACJA WYSOKOŚCI

- 1) poluzować nakrętkę [1]
- 2) przesunąć rurkę regulacyjną wzdłuż osi na odpowiadającą użytkownikowi wysokość
- 3) dokręcić nakrętkę [1]

MONTAŻ ZAWIESZEK

- 1) zawieszkę [1] z dłuższym wygięciem wsunąć w rurkę
- 2) zawieszkę [2] z krótszym wygięciem wsunąć w rurkę prostopadle do zawieszki [1]
- 3) wsunąć korek [3]

